

## **NOME DO PRODUTO: SONDA PLÁSTICA URETRAL FOYOMED**

Registro MS: 10150470535

## **DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Sondas

Matéria Prima: PVC

Produto Estéril: (X)Sim ( ) Não

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 5 anos

## **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Sonda em PVC flexível, com várias apresentações de calibres, usada para drenar e recolher urina da bexiga e/ou inserir fluidos na bexiga para medicação. Extremidade fechada, um furo lateral com bordas arredondadas e ponta atraumática.

## **INDICAÇÃO DE USO**

A Sonda Plástica Uretral Foyomed é usada para drenar e recolher urina da bexiga e/ ou para inserir fluidos na bexiga para medicação.

## **INSTRUÇÃO DE USO**

- Escolher a medida adequada do cateter de acordo com o tamanho do paciente.
- Abrir a embalagem de forma asséptica, retirar o cateter, a mão do operador e do paciente devem passar por desinfecção de rotina, o operador deve usar luvas.
- De modo a facilitar a inserção do cateter, a ponta e o tubo do cateter deve ser lubrificados com lubrificante hidrossolúvel ou outro lubrificante adequado.
- Inserir na uretra, lentamente até começar a drenagem de urina.

- Ao término da drenagem remover a sonda.
- Descartar em local apropriado.
- Prazo máximo de permanência no corpo do paciente é de 07 (sete) dias.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



☐ Livre de LÁTEX e contém DEHP.

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR CONECTOR
LB661004	Sonda Plástica Uretral 4 Fr	410mm±10mm	Cinza
LB661006	Sonda Plástica Uretral 6 Fr	410mm±10mm	Verde Claro
LB661008	Sonda Plástica Uretral 8 Fr	410mm±10mm	Azul
LB661010	Sonda Plástica Uretral 10 Fr	410mm±10mm	Preto
LB661012	Sonda Plástica Uretral 12 Fr	410mm±10mm	Branco

## FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

A Sonda Plástica Uretral Foyomed é fornecida estéril, embalada unitariamente em papel grau cirúrgico e filme polietileno termosselada.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fresco e seco.

## PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Uso único, descartar após o uso.
- Reprocessamento Proibido.
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.
- Livre de látex.
- Estéril a óxido de etileno.
- O produto deve ser manuseado por profissional devidamente habilitado.
- Usar imediatamente após a embalagem ser aberta.
- Prazo máximo de permanência no corpo do paciente é de 07 (sete) dias.