

	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm																								
105 mm	<p>SEDA Sutura Cirúrgica Não Absorvível</p> <p>Farmacopéia Dos Estados Unidos Da America (U.S.P.). Farmacopéia Brasileira.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">ATR / ME / 514 Revisión B / 2014</p> <p style="text-align: right; font-size: x-large;">CE1011</p>	<p style="text-align: center;">P</p> <p style="text-align: center;">Seda Sutura Cirúrgica Não Absorvível</p> <p style="text-align: right;">Português</p> <p>Descrição A Sutura Cirúrgica Seda Atramat* é uma sutura cirúrgica trançada não absorvível, feita à base de uma proteína orgânica, fibrosa, derivada do bicho da seda Bombyx Mori da família Bombycidae. A Sutura Cirúrgica Seda Atramat* tem sido elaborada torcendo um determinado número de filamentos e trançando-os ao redor de um núcleo a velocidade e tensão constante para obter um multifilamento compacto cuja superfície é recoberta com silicone. A Sutura Cirúrgica Seda Atramat* se apresenta em sua cor branca ou tingida em cor azul ou preta utilizando corantes atóxicos. A Sutura Cirúrgica Seda Atramat* cumpre com todos os requisitos estabelecidos pela Farmacopéia Brasileira, a Farmacopéia dos Estados Unidos da América (U.S.P.), e a Farmacopéia Europeia (E.P.), para suturas não absorvíveis.</p> <p>Indicações A Sutura Cirúrgica Seda Atramat* está indicada para usar-se na aproximação ou ligação de tecidos suaves em geral, incluindo os procedimentos de fechamento em geral, oftalmologia, micro cirurgia, cardiovascular e tecido neural.</p> <p>Efeitos Quando a Sutura Cirúrgica Seda Atramat* se aplica ao tecido, apresenta-se uma moderada reação tissular, característica de corpo estranho seguida de uma lenta formação de tecido fibroso conectivo ao redor da sutura. Ainda quando a Sutura Cirúrgica Seda Atramat* não é absorvida pelo tecido onde se aplica, a degradação progressiva in vivo da fibra proteínica de seda dá lugar a perda total de sua resistência à tensão em um período não maior de um ano.</p> <p>Contra-indicações Devido à perda gradual e total de sua resistência à tensão, a Sutura Cirúrgica Seda Atramat* não deve ser usada em procedimentos cirúrgicos que requerem proporcionar suporte artificial durante longos períodos de tempo e também não deve ser utilizada em procedimentos onde se requeira que a sutura mantenha permanentemente sua resistência à tensão inicial como, por exemplo, na fixação de próteses.</p> <p>Advertências Produto de Uso Único - Proibido Reprocessar Não reesterilize. O conteúdo deste pacote há sido esterilizado. Descarte o conteúdo do pacote em caso de que o encontre aberto. Descarte as suturas e o material do pacote que não utilize no momento. O contato prolongado com soluções salinas tais como as dos tratamentos urinários e biliares, pode resultar na formação de cálculos ao redor da sutura. O usuário antes de aplicar este produto deverá estar familiarizado com os procedimentos e técnicas cirúrgicas aplicáveis para suturas</p>	<p>não absorvíveis. Isto é importante devido ao risco de uma deiscência da ferida e a formação de tecido depende do lugar da aplicação e do tipo e calibre da sutura a utilizar. Como em qualquer caso de corpo estranho, na presença de contaminação bacteriana, esta sutura pode favorecer a infecção, pelo qual deverão seguir as práticas cirúrgicas aceitáveis para a drenagem e fechamento de feridas contaminadas ou infectadas. Ao suturar, deve-se ter cuidado para evitar danificar a agulha cirúrgica enquanto se utiliza. Segure a agulha na área compreendida entre o terço e a metade da distância entre o extremo da união do fio com a agulha e sua ponta. Se segurar perto da ponta, se poderá prejudicar a integridade funcional da agulha ou quebrá-la. Se segurar pela zona da união com o fio de sutura, poderia se romper o corpo da agulha ou a própria sutura na zona da união com o fio. Quando se altera a configuração das agulhas, pode-se provocar uma diminuição de sua resistência ao dobrar e assim quebrar-se.</p> <p>Condições de Armazenagem Temperatura entre 15-30°C (288-303°K), umidade relativa não superior a 65%, em local seco protegido de a luz solar.</p> <p>Precauções Como para qualquer outro tipo de sutura, deve-se ter cuidado no seu manuseio para evitar danos tanto do fio como ao tecido no qual se aplica. Se dever ter maior cuidado quando se utiliza com material cirúrgico tal como fórceps ou porta agulha devido à possibilidade de que com eles se produza um amassamento ou enrugamento da sutura. Para a segurança do nó se requer aplicar a técnica cirúrgica padrão como requerem as circunstâncias cirúrgicas e a experiência do cirurgião. Não utilizar após a data de validade.</p> <p>Instruções de Uso O uso deste produto deverá estar de acordo com os procedimentos e técnicas cirúrgicas utilizadas para suturas não absorvíveis, levando em consideração o lugar de aplicação.</p> <p>Reações Adversas Estas podem incluir as seguintes: deiscência da ferida, perda gradual e completa da resistência à tensão, formação de cálculos por contato prolongado com soluções salinas do trato urinário e biliar, maior propensão a infecção bacteriana, moderada reação tissular, dor, edema transitório e enrijecimento do tecido na área de aplicação da sutura.</p> <p>Apresentação do Produto A Sutura Cirúrgica Seda Atramat* esta disponível nas seguintes apresentações: • Caixa com 12, 24 ou 36 envelopes com suturas, com 1 ou 2 agulhas, em calibres 4 aos 8-0 (U.S.P.). As suturas apresentam-se em diversos comprimentos de fio e vários calibres de agulha.</p> <p>Data de validade 5 anos a partir da data de fabricação indicada na caixa.</p>	<p>Simbologia Internacional</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Não reesterilizar</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Código de Lote</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Certificação Europeia</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Valido até</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Produto estéril</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Data de fabricação</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Fabricado por:</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Oxido de etileno Raios gama</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Consultar as instruções de uso</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Não reutilizar</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Não utilizar se a embalagem estiver danificada</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Reg. ANVISA Nº 80160840017</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;"> Planta México: Internacional Farmacéutica, S.A. de C.V. MEXICO Carreteraco No. 44, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, 04040 Teléfono: (52 55) 5484 17 00 - Fax: (52 55) 5549 42 34 www.ifsacomex.com atencion.cliente@atramat.com custom.care@atramat.com </p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;"> Planta Lerma: Circuito de la Industria Poniente Lote 10-C, Col. Parque Industrial El Cerrillo, C.P. 52000, Lerma, Edo. de México. Teléfono: (52-728) 285 30 36 - Fax: (52-728) 285 3918 </p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;"> Importado e distribuído por: Atramat do Brasil Ltda. O dos Imigrantes, 1770 - Jd América, Bragança Paulista, SP - Brasil, CEP 12902-000 CNPJ 04.995.710/0001-50 SAC 0800 773-3337 Tel. +55 (11) 44817777 Fax +55 (11) 4032-7707 www.atramat.com.br atramat@atramat.com.br Farmacéutico Responsável: Beatriz Virginia Garracini Maga CRF-SP 14.069 </p>		Não reesterilizar		Código de Lote		Certificação Europeia		Valido até		Produto estéril		Data de fabricação		Fabricado por:		Oxido de etileno Raios gama		Consultar as instruções de uso		Não reutilizar				Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Não reesterilizar		Código de Lote																									
	Certificação Europeia		Valido até																									
	Produto estéril		Data de fabricação																									
	Fabricado por:		Oxido de etileno Raios gama																									
	Consultar as instruções de uso		Não reutilizar																									
			Não utilizar se a embalagem estiver danificada																									