



VitaMedical

KANGLI FILM  

Curativo Filme Rolo Transparente

Esterilização: Não Estéril

ANVISA nº 80691910009



Nossos produtos contam com os melhores selos de qualidade do mundo

Saiba mais em:

www.vitamedical.com.br

DESCRIÇÃO

O KANGLI FILM filme rolo transparente é um curativo não estéril, de poliuretano, hipoalergênico, adesivo e transparente, favorecendo a monitorização direta do local aplicado. Possui excelente aderência e fácil remoção, atuando como barreira de proteção para pele. É indicado para coberturas de curativos primários e proteção de áreas de atritos evitando lesões e úlceras por pressão, mantendo a sua integridade por ser semipermeável. Este produto apresenta permeabilidade seletiva, permitindo trocas gasosas e de vapores, e impermeável aos microrganismos e aos líquidos em geral, não sendo necessário a remoção para o banho. Todos os modelos contêm 10 metros de comprimento. O produto possui demarcações de recorte a cada 1 cm podendo ser recortado conforme necessidade de uso em cada caso.

BENEFÍCIOS

- Hipoalergênico e com fácil aplicação;
- Pode ser recortado e adaptado a cada necessidade;
- Permite a visualização/inspeção da condição do local onde está aplicado;
- Mantém o controle da umidade da pele através da alta permeabilidade de vapores;
- Barreira contra bactérias e agentes externos;
- Mais conforto e menos troca. Sua excelente aderência e matéria prima permitem ao KANGLI FILM uma maior duração.

INDICAÇÕES

Para uso direto ao consumidor ou profissional de saúde para fixação de tubos, drenos, bolsas coletoras e fixações em geral; como curativo secundário; como proteção da pele íntegra, proteção de tatuagens, proteção de regiões periestomas, prevenção de úlceras por pressão e neuropatias periféricas.

CONTRAINDICAÇÕES

O KANGLI FILM Rolo não é recomendável em incisões de cateter vascular e em feridas abertas com ou sem infecção.

PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

- A garantia do produto é válida desde que a embalagem não tenha sido violada ou danificada antes do uso;
- Leia as instruções de uso antes de utilizá-lo;
- Observar o local de aplicação avaliando a presença de sinais de infecção e reações alérgicas. Caso apareça esses sinais ou sintomas consulte um profissional da área de saúde;
- A Vita Medical Material Hospitalar não se responsabiliza por prejuízos que surjam como consequência de uso inapropriado;

- Antes de utilizá-lo, deve-se verificar a embalagem de forma minuciosa. O transporte e manipulação inadequados podem ocasionar danos à estrutura e à funcionalidade do produto;
- O fabricante recomenda uso único do produto;
- Descartar apropriadamente após o uso;

INSTRUÇÕES DE USO

1. Promover a limpeza da pele antes da aplicação, deixando-a sem resíduos e oleosidade, conforme os procedimentos padronizados ou de acordo com as instruções do profissional de saúde;
2. Selecione o tamanho apropriado ao local de aplicação e recorte na demarcação desejada;
3. Retire o papel protetor da aba menor para expor a parte adesiva do filme;
4. Aplicar sobre o local desejado sem esticá-lo;
5. Retirar a aba maior de papel para fixá-lo totalmente no local desejado;
6. Retirar as abas de proteção de plástico externas a partir do centro para total transparência do filme;
7. Para remover o curativo segure a pele e o cateter (se houver) e puxe cuidadosamente o curativo paralelamente ao local aplicado até a perda da aderência;
8. O intervalo de troca deve ser avaliado pelo profissional de saúde.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado e transportado em condições de temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo da luz e umidade, e mantendo-o na embalagem original e intacta.

VALIDADE

O prazo de validade, seguindo as condições de armazenamento descritas, é de dois anos. Após abertura e recorte da parte a ser utilizada.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O KANGLI FILM Rolo é comercializado individualmente em caixas de cartolina com rolo de 10 metros de comprimento. Embalagem primária: Plástico e papel. Embalagem secundária: Cartucho de cartolina. Para sua maior segurança, o transporte é feito em uma embalagem terciária de cartucho de cartolina reforçado.

TAMANHOS

O nosso produto possui tamanhos variados em 10 metros de rolo: 05cm X 10m; 10cm X 10m; 15cm X 10m.

Número de lote, data de fabricação e de vencimento: vide cartucho.
Armazenar e transportar à temperatura ambiente, ao abrigo de luz e umidade.



Armazenar em
local seco



Armazenar sob
temperatura ambiente

Importado e Distribuído por: **Vita Medical Material Hospitalar LTDA**
CNPJ: 10.545.970/0001-26
Endereço: AC ADE Conjunto 16 Lote 17/18, Lojas 01 e 02. Águas Claras. Brasília-DF.
Atendimento ao Cliente: (61) 3225-8514
E-mail: tecnico@vitamedical.com.br
Aut. Func. Anvisa/MS nº G799WLL6HMOW
Responsável Técnico: Ludimila Gonçalves Silvério Lacerda. COREN-DF 364901-ENF
Fabricado por: Zhejiang Kangli Medical Articles Co., LTD - CHINA