

NOME DO PRODUTO: AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA - SAFER

Registro MS: 10150470625

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Agulha para biopsia

Matéria Prima: ABS e Aço Inoxidável

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 5 anos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Agulha de Aspiração de Medula Óssea é composta por estilete com trava e delimitador, que pode efetivamente delimitar o comprimento da agulha de punção entrando na medula óssea humana, e alcançar a finalidade de aspirar com segurança a amostra de medula óssea.

INDICAÇÃO DE USO

A Agulha para Aspiração de Medula Óssea Safer é principalmente usada em punção aspirativa no osso esterno ou no íliaco, para aspirar o líquido da medula óssea.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Verifique a condição da embalagem, data de esterilização e prazo de validade antes de usar.
2. Utilize técnica asséptica.
3. Abra o pacote e retire a agulha, siga o protocolo da instituição para punção de medula óssea, se houver muita resistência durante o processo de perfuração, não force à entrada da agulha, para não haver acidente.
4. Após a remoção, o líquido da medula deve ser enviado imediatamente para o procedimento de esfregaço. O tecido viável deve ser colocado em tubo apropriado.

5. Descartar o produto após o uso. Produto proibido reprocessar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

Corpo - ABS

Agulha - 304 Aço inoxidável

Estilete com trava - ABS + 304 Aço inoxidável

FOTO



APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	TAMANHO	COMPRIMENTO TOTAL	COMPRIMENTO AJUSTÁVEL
BNBST015-40	15G	40mm	25 - 40mm
BNBST016-40	16G	40mm	25 - 40mm
BNBST018-35	18G	35mm	20 - 35mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

A Agulha para Aspiração de Medula Óssea Safer é estéril embalada unitariamente em papel celulose PP+Dialysis paper acondicionada em caixa de papel com 10 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em umidade relativa não superior a 80%, sem gás corrosivo e ambiente bem ventilado.

Deve ser transportado protegido contra umidade, exposição a chuva e neve, calor, pressão e impacto.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Uso único, não reutilizar ou reesterilizar.

Proibido reprocessar.

Verificar validade do produto antes do uso.

O produto deve ser manipulado por profissional técnico habilitado.

Usar o produto imediatamente após abrir embalagem. Descartar após o uso.

Verificar o produto antes do uso, danos na embalagem ou produto úmido são estritamente proibidos.

A esterilidade do produto é garantida dentro do prazo de validade.

Ler instrução de uso antes de utilizar o produto.

Abra o pacote e utilize de acordo com o procedimento da operação de punção da medula óssea; Observe que, se houver muita resistência no processo de perfuração, não force a agulha para evitar acidentes.

Deve ser estritamente de acordo com os procedimentos relevantes, atenção intraoperatória para observar o pulso do paciente, respiração e pele, 24 horas após a operação para observar o local da punção se não há hematoma, sangramento e infecção.

O uso deve ser estritamente com técnica asséptica, a fim de prevenir a infecção.

Vários diagnósticos de doenças do sangue, sépsis, certas doenças infecciosas ou parasitárias necessitam de cultura bacteriana de esfregaços de medula óssea ou de Plasmodium vivax e insecto de patógeno de calor preto; diagnóstico do sistema reticuloendotelial de metástase óssea de tumor maligno.

Pacientes com hemofilia, anormalidade da função coagulante, infecção no local da punção e doença de pele não devem ser puncionados, em pacientes com tendência hemorrágica, deve-se prestar uma atenção especial.