

NOME DO PRODUTO: LAMINA PARA BISTURI – FEATHER

Registro MS: 10150470234

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Laminas de Bisturi Descartáveis

Matéria Prima: Lamina em aço carbono (nº 15C em aço inoxidável)

Método de Esterilização: Radiação Gama

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Confeccionada em aço da mais alta qualidade, laminado a frio, com tratamento térmico que assegura a sua resistência e alto poder de corte; Seu processo de fabricação é automático e acompanhado em todas as fases de fabricação; O fio da lâmina não é manuseado em nenhuma etapa.

INDICAÇÃO DE USO

Utilizada em procedimentos cirúrgicos, curativos e outros que necessitem de incisões.

INSTRUÇÃO DE USO


Abrir a embalagem assepticamente;

Encaixar a lâmina no cabo de bisturi;

Adotando a técnica cirúrgica adequada, o cirurgião deve executar a incisão;

Descartar após o uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

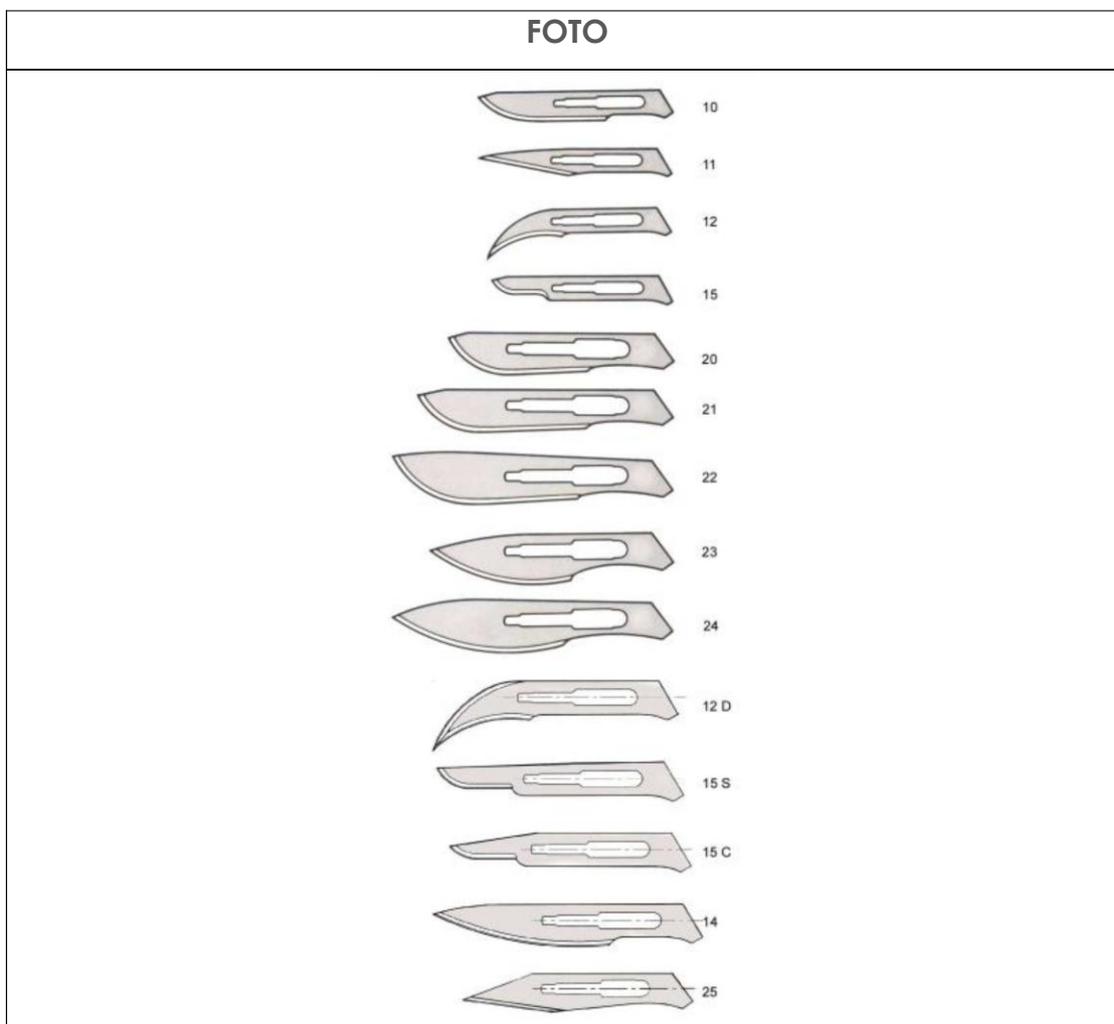

* Produto isento de Látex.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4004.10	Lâmina nº 10
4004.11	Lâmina nº 11
4004.12	Lâmina nº 12
4004.15	Lâmina nº 15
4004.15C	Lâmina nº 15C (Dental)
4004.20	Lâmina nº 20
4004.21	Lâmina nº 21
4004.22	Lâmina nº 22
4004.23	Lâmina nº 23
4004.24	Lâmina nº 24

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalada unitariamente em envelope constituído pela estrutura alumínio poli, fechado por termosselagem. Caixa com 100 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento de sua utilização, a fim de manter sua esterilidade;

Armazenar em local seco e fresco.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Retirar assepticamente de sua embalagem;

Não utilizar caso a embalagem esteja aberta ou danificada;

Não deve ser reutilizado. É de uso único.