

## **NOME DO PRODUTO: DRENO DE SUCÇÃO CAPILAR PENROSE EM SILICONE – WELL LEAD**

**Registro MS: 10150470476**

### **DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Drenos

Matéria Prima: Silicone 100%

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: ( X ) Sim ( ) Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO

### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O dreno para sucção capilar penrose Well Lead é composto de 100% silicone, o que o torna um material menos traumático. Possui tamanhos variados de 1 até o 4 com comprimento de 30cm e possui uma linha radiopaca.

### **INDICAÇÃO DE USO**

Tem indicação para drenagem de fluídos corporais durante o pós-operatório e pós drenagem de abscessos.

### **INSTRUÇÃO DE USO**

Verificar se a embalagem não está danificada;

- Abrir a embalagem de forma asséptica e retire o dreno para sucção capilar penrose Well Lead;
- Faça a abertura hipodérmica para a passagem do dreno;

- Certifique-se do local a ser colocado, posicionando-o no local próximo a região com maior coleção de líquido;
- Inserir o dreno na posição apropriada com a ajuda de estilete; - Colocar o dreno a um receptor de secreções.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

\* Produto isento de Látex.



## APRESENTAÇÃO COMERCIAL

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>D.E.</b>
602.00.603	Dreno de Sucção Capilar Penrose – nº 1	6 mm
602.00.803	Dreno de Sucção Capilar Penrose – nº 2	8 mm
602.01.003	Dreno de Sucção Capilar Penrose – nº 3	10 mm
602.01.203	Dreno de Sucção Capilar Penrose – nº 4	12 mm

## FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalado em Papel Grau Cirúrgico. Caixa com 10 unidades.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fresco e seco, à temperatura ambiente.

## PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Não usar se embalagem estiver danificada;

Produto de uso único;

Proibido reprocessar;

Evite frio e calor excessivo.