

NOME DO PRODUTO: AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA – WILTEX

Registro MS: 10150470517

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Agulhas

Matéria Prima: Aço Inox

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (X)Sim ()Não

Validade: 05 Anos

USO ÚNICO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Agulha Hipodérmica Estéril de uso único com Dispositivo de Segurança – Wiltex. Apresentação em diversos calibres e tamanhos com a capa de proteção correspondendo ao padrão internacional de cores. Protege o profissional da área de saúde conforme a NR32.

INDICAÇÃO DE USO

Este dispositivo destina-se à injeção ou aspiração de fluidos utilizando uma seringa Luer-lock ou Luer-slip. Após a utilização o dispositivo de proteção cobre a agulha para evitar acidentes.

INSTRUÇÃO DE USO

- 1- Abrir a embalagem unitária de forma asséptica. Para evitar a contaminação, tenha cuidado para não tocar no conector Luer da Agulha Hipodérmica com Dispositivo de segurança Wiltex.
- 2- Com um movimento suave de rotação, adapte a seringa ao conector

Luer da Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança Wiltex.

- 3- Posicione a tampa de segurança de modo a evitar danificar a ponta da agulha.
- 4- Aspire o fármaco para a seringa utilizando a técnica asséptica.
- 5- Execute a injeção seguindo os protocolos vigentes a uma técnica asséptica.
- 6- Após a conclusão do procedimento, pressione suavemente a tampa da agulha contra uma superfície plana.
- 7- Confirme visualmente se a agulha está totalmente encaixada dentro da tampa de proteção da agulha.
- 8- Descartar em um recipiente adequado para estes objetos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALIBRE	MEDIDA ANTERIOR	MEDIDA ATUAL	COR
MDL1840S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltes	18G X 1 1/2"	40X1.20mm	1.20X40mm	ROSA
MDL2125S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltex	21GX1"	25X0.80mm	0.80x25mm	VERDE
MDL2130S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltex	21GX1 ¼"	30X0.80mm	0.80x30mm	VERDE
MDL2140S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltex	21GX1 ½"	40X0.80mm	0.80x40mm	VERDE
MDL2225S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltex	22GX1	25X0.70mm	0.70x25mm	PRETO
MDL2230S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltex	22GX1 ¼"	30X0.70mm	0.70x30mm	PRETO
MDL2240S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltex	22GX 1 ½"	40X0.70mm	0.70x40mm	PRETO
MDL2325S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltex	23GX1"	25X0.60mm	0.60x25mm	AZUL
MDL2420S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltex	24GX 3/4"	20X0.55mm	0.55x20mm	ROXO
MDL2525S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltex	25GX1"	25X0.50mm	0.50x25mm	LARANJA

MDL2613S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltex	26GX1/2"	13X0.45mm	0.45x13mm	MARROM
MDL2713S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltex	27GX1/2	13X0.40mm	0.40x13mm	CINZA
MDL3013S	Agulha Hipodérmica Estéril com Dispositivo de Segurança Wiltex	30GX1/2"	13X0.30mm	0.30x13mm	AMARELO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cânula metálica em aço inóx AISI 304

Hub e dispositivo de segurança (capa protetora) em Polipropileno

FOTO



APRESENTAÇÃO COMERCIAL

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

A agulha hipodérmica estéril com dispositivo de segurança é embalada unitariamente em pouch de papel grau cirúrgico e filme. Posteriormente em caixas intermediarias com 100 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Este produto deverá ser armazenado e transportado em temperatura entre -5 e 50 graus centígrados e com umidade inferior a 90%.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Uso único, descartar após o uso;
- Proibido Reprocessar;